

Gebrauchsanweisung PureVision
 Hersteller: Rochester and Waterford
 FP-3234
 Markt: EMEA

EM-4018
 Rev. B

PUREVISION® GEBRAUCHSANWEISUNG

Dieses Merkblatt soll Anwender von hydrophilen, weichen PureVision®-Kontaktlinsen darüber informieren, was beim Tragen und der Pflege der Linsen zu beachten ist. Es gilt für:


PRODUKTNAME	MATERIAL	WASSERGEHALT	VERPACKUNGSLOSUNG
PureVision® (Balafilcon A) leicht getönte Kontaktlinsen	Balafilcon A	36% Gewichtsprozent	Boratgepufferte Kochsalzlösung
PureVision® 2 (Balafilcon A) leicht getönte Kontaktlinsen	Balafilcon A	36% Gewichtsprozent	Boratgepufferte Kochsalzlösung mit 0,5% Poloxamin

Beschreibung und Tragemodus

Diese Linsen eignen sich zum täglichen Tragen mit einem vom Kontaktlinsenspezialisten empfohlenen Austauschintervall. Je nach Empfehlung des Kontaktlinsenspezialisten können sie auch als Disposable-Linsen getragen werden, die nach jedem Tragen entsorgt werden, oder über 1 bis 30 Tage im Extended Wear-Modus. Werden die Linsen wieder verwendet, müssen sie zwischen dem Absetzen und Wiederaufsetzen gereinigt, abgespült und desinfiziert werden.

Kontaktlinsen aus Balafilcon A können auch zu therapeutischen Zwecken bei Erkrankungen des Hornhautepithels verwendet werden.

Halten Sie sich immer an die von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlenen Tragemodalitäten und Austauschintervalle.

Die Linsen werden in sterilem Zustand ausgeliefert und wurden vom Hersteller zur weiteren Verwendung gemäß Anleitung des Kontaktlinsenspezialisten konzipiert. Sie wurden unter Dampf sterilisiert. **STERILE** 

Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder geöffnet ist.

Anleitung zum Aufsetzen und Absetzen

Bevor Sie die Linsen berühren, waschen und trocknen Sie immer Ihre Hände gründlich, wobei Sie parfümierte Seife oder Seife mit medizinischen Zusätzen vermeiden sollten. Legen Sie die Linse auf Ihre Handfläche. Achten Sie darauf, dass die Linse mit der richtigen Seite nach außen zeigt.



Überprüfen Sie die Linse vor dem Aufsetzen auf mögliche Kratzer oder Beschädigungen.

Achten Sie beim Absetzen der Linse darauf, dass Ihre Hände sauber und trocken sind. Schieben Sie die Linse mit dem Finger nach unten in den weißen Bereich des Auges und nehmen Sie sie aus dem Auge. Verwenden Sie Benetzungstropfen, wenn sich die Linse nur schwer absetzen lässt.

Linsenpflege

- Die Reinigung und Desinfektion Ihrer Linsen zwischen den Verwendungen ist unerlässlich für gesunde Augen
- Verwenden Sie ausschließlich Pflegemittel für weiche Kontaktlinsen gemäß Anweisungen des Herstellers
- Verwenden Sie immer frische Linsenpflegelösungen, deren Ablaufdatum noch nicht erreicht ist

- Verwenden Sie keine anderen Lösungen, z.B. Leitungswasser, Mineralwasser oder Speichel, um die Linsen abzuspülen, aufzubewahren oder zu benetzen
- Halten Sie die Linsen immer vollständig in der empfohlenen Lösung eingetaucht, wenn Sie sie nicht tragen
- Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände oder Fingernägel, um die Linsen aus dem Behälter oder dem Auge zu nehmen
- Denken Sie immer daran, beim Reinigen der Linsen auch den Linsenbehälter zu reinigen
- Entsorgen Sie die Linsen stets nach dem von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlenen Tragezeitraum.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Wenn Sie sich nicht an die von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlenen Tragezeiträume und Reinigungsverfahren halten, kann dies zu einem höheren Risiko für schwerwiegende Augeninfektionen führen.

Tragen Sie keine Kontaktlinsen, wenn Sie unter folgenden Zuständen leiden:

- Allergie, Entzündung, Infektion oder Rötung im oder am Auge
- Trockene Augen (keine ausreichende Tränenflüssigkeit)
- Schlechter Gesundheitszustand, der sich auf die Augen auswirkt, z.B. Erkältung oder Grippe
- Systemische Erkrankung, die sich auf die Augen auswirkt.

Wenden Sie sich in folgenden Situationen vor dem Tragen von Kontaktlinsen an Ihren Kontaktlinsenspezialisten:

- Ausüben von Wassersport
- Aufenthalt in extrem trockenen oder staubigen Umgebungen
- Verwendung von Augenmedikamenten.

Wenn eines der folgenden Probleme bei Ihnen auftritt, nehmen Sie Ihre Linsen **sofort** aus dem Auge:

- Stechen, Brennen, Jucken, Reizung oder sonstige Schmerzen im Auge
- Verringerter Tragekomfort im Vergleich zu früherem Tragen
- Ungewöhnliche Sekretbildung oder übermäßiges Tränen der Augen
- Rötung der Augen
- Extrem oder anhaltend trockene Augen
- Eingeschränkte oder verschwommene Sicht
- Regenbögen oder Lichthöfe um Lichtquellen
- Lichtempfindlichkeit

Hält eines dieser Symptome auch nach dem Absetzen, Reinigen und Wiederaufsetzen der Linse oder dem Aufsetzen einer neuen Linse an, setzen Sie die Linse ab und **wenden Sie sich an Ihren Kontaktlinsenspezialisten**. Diese Symptome können zu schwerwiegenderen Erkrankungen führen, wenn sie ignoriert werden.

Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit Pflegelösungen:

Verwenden Sie niemals das Desinfektionssystem von Allergan Ultracare oder eine seiner Komponenten (Oxysept Ultracare-Desinfektionslösung, Oxysept-Neutralisationstabletten oder Ultrazyme-Enzymreiniger, um die Bausch + Lomb® PureVision® 2 (Balafilcon A)-Kontaktlinsen zu reinigen oder zu desinfizieren, da sich dadurch die Parameter der Linsen verändern können.

Erläuterung der auf Etiketten und Schachteln verwendeten Symbole



Gebühren gemäß Verpackungsrichtlinie 94/62/EG entrichtet



Gemäß Bundesrecht (U.S.A.) darf dieses Produkt ausschließlich von bzw. im Auftrag von hierzu befugten Personen verkauft werden.



Bausch & Lomb Incorporated
Rochester NY 14609, USA



Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK
Ausgabedatum: 2010-12-13



0050

® / ™ bezeichnen Warenzeichen von Bausch & Lomb Incorporated. Andere Produkt-/Markenbezeichnungen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

© Bausch & Lomb Incorporated

Artikelnummer: PURIFUDE